

金属锁定接骨板钉系统产品使用说明书

生产许可证编号：浙食药监械生产许 20100088 号

产品注册证编号：国械注准 20143462306

注册产品标准编号：YZB/国 3883-2013

一 产品名称、组成、型号、规格

- 1 产品名称：金属锁定接骨板钉系统。
- 2 产品组成：由锁定接骨板和锁定螺钉和/或封孔螺丝组成。
- 3 产品型号：直型、异型。
- 4 产品规格：产品型式代号、产品描述及规格见表 1、表 2。

表 1 金属锁定接骨板型式规格表

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
直型 锁定 接骨 板	ZSDZ01	限制性接触锁定加压接骨板	4~18 孔	长：68.5~250.5±2.0（每间隔 13mm 为一规格） 宽：11.0±0.5、12.0±0.5 厚：3.0±0.25、3.5±0.25
	ZSDP01	限制性接触普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW01	限制性接触万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ01	限制性接触结合孔锁定加压接骨板		
	ZSDZ02	限制性接触锁定加压接骨板	4~18 孔	长：86.5~338.5±2.0（每间隔 18mm 为一规格） 宽：14.0±0.5、15.0±0.5 厚：4.0±0.25、4.5±0.25
	ZSDP02	限制性接触普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW02	限制性接触万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ02	限制性接触结合孔锁定加压接骨板		
	ZSDZ03	限制性接触锁定加压接骨板	4~18 孔	长：92.5~344.5±2.0（每间隔 18mm 为一规格） 宽：17.3±0.5、17.5±0.5 厚：5.0±0.25、5.4±0.25
	ZSDP03	限制性接触普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW03	限制性接触万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ03	限制性接触结合孔锁定加压接骨板		
	ZSDZ04	重建锁定加压接骨板	4~18 孔	长：48~216±2.0（每间隔 12mm 为一规格） 宽：10.0±0.5 厚：3.0±0.25
	ZSDP04	重建普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW04	重建万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ04	重建结合孔锁定加压接骨板		
	ZSDZ05	重建锁定接骨板	4~18 孔	长：48~216±2.0（每间隔 12mm 为一规格） 宽：10.0±0.5 厚：3.0±0.25
	ZSDP05	重建普通螺纹孔锁定接骨板		
	ZSDW05	重建万向孔锁定接骨板		
	ZSDJ05	重建结合孔锁定接骨板		
	ZSDZ06	3.5mm 干骺端锁定加压接骨板	4~18 孔	长：67.5~249.5±2.0（每间隔 13mm 为一规格） 宽：11.0±0.5 厚：3.5±0.25（板体最厚处）
	ZSDP06	3.5mm 干骺端普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW06	3.5mm 干骺端万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ06	3.5mm 干骺端结合孔锁定加压接骨板		
	ZSDZ07	4.5mm 干骺端锁定加压接骨板	7~18 孔	长：102.5~300.5±2.0（每间隔 18mm 为一规格） 宽：14.0±0.5 厚：4.5±0.25（板体最厚处）
	ZSDP07	4.5mm 干骺端普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW07	4.5mm 干骺端万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ07	4.5mm 干骺端结合孔锁定加压接骨板		
	ZSDZ08	微型直型锁定加压接骨板	4~12 孔	长：36~100±2.0（每间隔 8mm 为一规格） 宽：4.0±0.5、4.5±0.5、5.0±0.5、6.4±0.5 厚：1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2、2.0±0.2
	ZSDP08	微型直型普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	ZSDW08	微型直型万向孔锁定加压接骨板		
	ZSDJ08	微型直型结合孔锁定加压接骨板		
ZSDZ09	微型直型锁定接骨板	4~12 孔	长：20~60±2.0（每间隔 5mm 为一规格） 宽：4.0±0.5、4.5±0.5、5.0±0.5、6.4±0.5 厚：1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2、2.0±0.2	
ZSDP09	微型直型普通螺纹孔锁定接骨板			
ZSDW09	微型直型万向孔锁定接骨板			
ZSDJ09	微型直型结合孔锁定接骨板			
ZSDZ10	链式重建锁定接骨板	4~18 孔	长：57.5~281.5±2.0（每间隔 16mm 为一规格） 宽：9.5±0.5 厚：3.7±0.25	
ZSDP10	链式重建普通螺纹孔锁定接骨板			
ZSDW10	链式重建万向孔锁定接骨板			
ZSDJ10	链式重建结合孔锁定接骨板			
ZSDZ11	微型链式锁定加压接骨板	4~12 孔	长：24~72±2.0（每间隔 6mm 为一规格） 宽：4.5±0.5、5.0±0.5、6.4±0.5 厚：0.8±0.2、1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2、2.0±0.2	
ZSDP11	微型链式普通螺纹孔锁定加压接骨板			
ZSDW11	微型链式万向孔锁定加压接骨板			
ZSDJ11	微型链式结合孔锁定加压接骨板			
ZSDZ12	直型锁定张力带接骨板	4~18 孔	长：92.5~344.5±2.0（每间隔 18mm 为一规格） 宽：17.5±0.5 厚：5.5±0.25、6.0±0.25、6.5±0.25	
ZSDP12	直型普通螺纹孔锁定张力带接骨板			
ZSDW12	直型万向孔锁定张力带接骨板			
ZSDJ12	直型结合孔锁定张力带接骨板			

表 1 金属锁定接骨板型式规格表 (续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
	ZSDZ13	微型链式锁定接骨板	4~12 孔	长: 24~72±2.0 (每间隔 6mm 为一规格) 宽: 4.0±0.5、4.5±0.5、5.0±0.5、6.4±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2、2.0±0.2
	ZSDP13	微型链式普通螺纹孔锁定接骨板		
	ZSDW13	微型链式万向孔锁定接骨板		
	ZSDJ13	微型链式结合孔锁定接骨板		
异型锁定接骨板	YSDZ01	窄头小 T 型锁定加压接骨板	3~12 孔	长: 52~160±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP01	窄头小 T 型普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW01	窄头小 T 型万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ01	窄头小 T 型结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ02	宽头小 T 型锁定加压接骨板	3~12 孔	长: 54.5~162.5±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP02	宽头小 T 型普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW02	宽头小 T 型万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ02	宽头小 T 型结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ03	窄头斜 T 型锁定加压接骨板(右)	3~12 孔	长: 59~167±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP03	窄头斜 T 型普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDW03	窄头斜 T 型万向孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDJ03	窄头斜 T 型结合孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDZ04	窄头斜 T 型锁定加压接骨板(左)	3~12 孔	长: 59~167±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP04	窄头斜 T 型普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW04	窄头斜 T 型万向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ04	窄头斜 T 型结合孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDZ05	宽头斜 T 型锁定加压接骨板(右)	3~12 孔	长: 60~168±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP05	宽头斜 T 型普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDW05	宽头斜 T 型万向孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDJ05	宽头斜 T 型结合孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDZ06	宽头斜 T 型锁定加压接骨板(左)	3~12 孔	长: 60~168±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP06	宽头斜 T 型普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW06	宽头斜 T 型万向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ06	宽头斜 T 型结合孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDZ07	三叶型锁定加压接骨板	3~12 孔	长: 77~221±2.0 (每间隔 16mm 为一规格) 宽: 15.0±0.5 厚: 2.5±0.25
	YSDP07	三叶型普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW07	三叶型万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ07	三叶型结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ08	尺骨鹰嘴锁定加压接骨板	3~16 孔	长: 72~228±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP08	尺骨鹰嘴普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW08	尺骨鹰嘴万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ08	尺骨鹰嘴结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ09	A 型锁定加压接骨板	3~16 孔	长: 72~228±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP09	A 型普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW09	A 型万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ09	A 型结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ10	肱骨内上髁锁定加压接骨板	2~10 孔	长: 61~149±2.0 (每间隔 11mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25
	YSDP10	肱骨内上髁普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW10	肱骨内上髁万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ10	肱骨内上髁结合孔锁定加压接骨板		
YSDZ11	肱骨近端外侧锁定加压接骨板(左)	3~12 孔	长: 80.5~179.5±2.0 (每间隔 11mm 为一规格) 宽: 12.5±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25	
YSDP11	肱骨近端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDW11	肱骨近端外侧万向孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDJ11	肱骨近端外侧结合孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDZ12	肱骨近端外侧锁定加压接骨板(右)	3~12 孔	长: 80.5~179.5±2.0 (每间隔 11mm 为一规格) 宽: 12.5±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25	
YSDP12	肱骨近端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDW12	肱骨近端外侧万向孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDJ12	肱骨近端外侧结合孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDZ13	肱骨近端锁定加压接骨板	3~18 孔	长: 73.5~253.5±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 12.5±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25	
YSDP13	肱骨近端普通螺纹孔锁定加压接骨板			
YSDW13	肱骨近端万向孔锁定加压接骨板			
YSDJ13	肱骨近端结合孔锁定加压接骨板			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁定 接骨 板	YSDZ14	肱骨远端背外侧锁定接骨板 I (左)	3~18 孔	长: 74~299±2.0 (每间隔 15mm 为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP14	肱骨远端背外侧普通螺纹孔锁定接骨板 I (左)		
	YSDW14	肱骨远端背外侧万向孔锁定接骨板 I (左)		
	YSDJ14	肱骨远端背外侧结合孔锁定接骨板 I (左)		
	YSDZ15	肱骨远端背外侧锁定接骨板 I (右)	3~18 孔	长: 74~299±2.0 (每间隔 15mm 为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP15	肱骨远端背外侧普通螺纹孔锁定接骨板 I (右)		
	YSDW15	肱骨远端背外侧万向孔锁定接骨板 I (右)		
	YSDJ15	肱骨远端背外侧结合孔锁定接骨板 I (右)		
	YSDZ16	肱骨远端背外侧锁定接骨板 II (左)	3~18 孔	长: 74~299±2.0 (每间隔 15mm 为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP16	肱骨远端背外侧普通螺纹孔锁定接骨板 II (左)		
	YSDW16	肱骨远端背外侧万向孔锁定接骨板 II (左)		
	YSDJ16	肱骨远端背外侧结合孔锁定接骨板 II (左)		
	YSDZ17	肱骨远端背外侧锁定接骨板 II (右)	3~18 孔	长: 74~299±2.0 (每间隔 15mm 为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP17	肱骨远端背外侧普通螺纹孔锁定接骨板 II (右)		
	YSDW17	肱骨远端背外侧万向孔锁定接骨板 II (右)		
	YSDJ17	肱骨远端背外侧结合孔锁定接骨板 II (右)		
	YSDZ18	腓骨远端锁定加压接骨板 II	3~16 孔	长: 67.5~223.5±2.0 (每间隔 12mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25、2.5±0.25
	YSDP18	腓骨远端普通螺纹孔锁定加压接骨板 II		
	YSDW18	腓骨远端万向孔锁定加压接骨板 II		
	YSDJ18	腓骨远端结合孔锁定加压接骨板 II		
	YSDZ19	鹰嘴窝锁定加压接骨板(左)	3~10 孔	长: 78~183±2.0 (每间隔 15mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP19	鹰嘴窝普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW19	鹰嘴窝万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ19	鹰嘴窝结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ20	鹰嘴窝锁定加压接骨板(右)	3~10 孔	长: 78~183±2.0 (每间隔 15mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP20	鹰嘴窝普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW20	鹰嘴窝万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ20	鹰嘴窝结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ21	锁骨锁定加压接骨板(右)	4~10 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP21	锁骨普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW21	锁骨万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ21	锁骨结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ22	锁骨锁定加压接骨板(左)	4~10 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP22	锁骨普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW22	锁骨万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ22	锁骨结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ23	锁骨钩锁定加压接骨板(右)	3~4 孔	宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25 高: 14~20 (每隔 1mm 为一规格)
	YSDP23	锁骨钩普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW23	锁骨钩万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ23	锁骨钩结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ24	锁骨钩锁定加压接骨板(左)	3~4 孔	宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25 高: 14~20 (每隔 1mm 为一规格)
	YSDP24	锁骨钩普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
YSDW24	锁骨钩万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ24	锁骨钩结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ25	解剖型锁骨钩锁定加压接骨板(右)	3~12 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25 高: 14~20 (每隔 1mm 为一规格)	
YSDP25	解剖型锁骨钩普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW25	解剖型锁骨钩万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ25	解剖型锁骨钩结合孔锁定加压接骨板(右)			
YSDZ26	解剖型锁骨钩锁定加压接骨板(左)	3~12 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25 高: 14~20 (每隔 1mm 为一规格)	
YSDP26	解剖型锁骨钩普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW26	解剖型锁骨钩万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ26	解剖型锁骨钩结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ27	S 型锁骨肩胛段锁定接骨板(右)	4~12 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25	
YSDP27	S 型锁骨肩胛段普通螺纹孔锁定接骨板(右)			
YSDW27	S 型锁骨肩胛段万向孔锁定接骨板(右)			
YSDJ27	S 型锁骨肩胛段结合孔锁定接骨板(右)			

表 1 金属锁定接骨板型式规格表 (续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁 定 接 骨 板	YSDZ27	S型锁骨中段锁定接骨板(右)	4~12孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP27	S型锁骨中段普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW27	S型锁骨中段万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ27	S型锁骨中段结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ27	S型锁骨内段锁定接骨板(右)	4~12孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP27	S型锁骨内段普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW27	S型锁骨内段万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ27	S型锁骨内段结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ28	S型锁骨肩胛段锁定接骨板(左)	4~12孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP28	S型锁骨肩胛段普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW28	S型锁骨肩胛段万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ28	S型锁骨肩胛段结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ28	S型锁骨中段锁定接骨板(左)	4~12孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP28	S型锁骨中段普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW28	S型锁骨中段万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ28	S型锁骨中段结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ28	S型锁骨内段锁定接骨板(左)	4~12孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP28	S型锁骨内段普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW28	S型锁骨内段万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ28	S型锁骨内段结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ29	跟骨锁定接骨板 I (右)	11孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP29	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 I (右)		
	YSDW29	跟骨万向孔锁定接骨板 I (右)		
	YSDJ29	跟骨结合孔锁定接骨板 I (右)		
	YSDZ30	跟骨锁定接骨板 I (左)	11孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP30	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 I (左)		
	YSDW30	跟骨万向孔锁定接骨板 I (左)		
	YSDJ30	跟骨结合孔锁定接骨板 I (左)		
	YSDZ31	跟骨锁定接骨板 II (右)	13孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP31	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 II (右)		
	YSDW31	跟骨万向孔锁定接骨板 II (右)		
	YSDJ31	跟骨结合孔锁定接骨板 II (右)		
	YSDZ32	跟骨锁定接骨板 II (左)	13孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP32	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 II (左)		
	YSDW32	跟骨万向孔锁定接骨板 II (左)		
	YSDJ32	跟骨结合孔锁定接骨板 II (左)		
	YSDZ33	跟骨锁定接骨板 III (右)	14孔	厚: 2.0±0.25
YSDP33	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 III (右)			
YSDW33	跟骨万向孔锁定接骨板 III (右)			
YSDJ33	跟骨结合孔锁定接骨板 III (右)			
YSDZ34	跟骨锁定接骨板 III (左)	14孔	厚: 2.0±0.25	
YSDP34	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 III (左)			
YSDW34	跟骨万向孔锁定接骨板 III (左)			
YSDJ34	跟骨结合孔锁定接骨板 III (左)			
YSDZ35	跟骨锁定接骨板 IV (右)	13孔	厚: 2.0±0.25	
YSDP35	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 IV (右)			
YSDW35	跟骨万向孔锁定接骨板 IV (右)			
YSDJ35	跟骨结合孔锁定接骨板 IV (右)			
YSDZ36	跟骨锁定接骨板 IV (左)	13孔	厚: 2.0±0.25	
YSDP36	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 IV (左)			
YSDW36	跟骨万向孔锁定接骨板 IV (左)			
YSDJ36	跟骨结合孔锁定接骨板 IV (左)			
YSDZ37	跟骨锁定接骨板 V (右)	16孔	厚: 2.0±0.25	
YSDP37	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 V (右)			
YSDW37	跟骨万向孔锁定接骨板 V (右)			
YSDJ37	跟骨结合孔锁定接骨板 V (右)			

表 1 金属锁定接骨板型式规格表 (续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁定 接骨 板	YSDZ38	跟骨锁定接骨板 V (左)	16 孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP38	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 V (左)		
	YSDW38	跟骨方向孔锁定接骨板 V (左)		
	YSDJ38	跟骨结合孔锁定接骨板 V (左)		
	YSDZ39	胫骨平台内侧锁定加压接骨板 (右)	2~18 孔	长: 82~370±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP39	胫骨平台内侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDW39	胫骨平台内侧方向孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDJ39	胫骨平台内侧结合孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDZ40	胫骨平台内侧锁定加压接骨板 (左)	2~18 孔	长: 82~370±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP40	胫骨平台内侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW40	胫骨平台内侧方向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ40	胫骨平台内侧结合孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDZ41	胫骨远端外侧锁定加压接骨板 (右)	2~18 孔	长: 85~373±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP41	胫骨远端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDW41	胫骨远端外侧方向孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDJ41	胫骨远端外侧结合孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDZ42	胫骨远端外侧锁定加压接骨板 (左)	2~18 孔	长: 85~373±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP42	胫骨远端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW42	胫骨远端外侧方向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ42	胫骨远端外侧结合孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDZ43	胫骨远端内侧锁定加压接骨板 (右)	3~18 孔	长: 82~352±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.5±0.25
	YSDP43	胫骨远端内侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDW43	胫骨远端内侧方向孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDJ43	胫骨远端内侧结合孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDZ44	胫骨远端内侧锁定加压接骨板 (左)	3~18 孔	长: 82~352±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.5±0.25
	YSDP44	胫骨远端内侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW44	胫骨远端内侧方向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ44	胫骨远端内侧结合孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDZ45	胫骨远端外侧叉形锁定加压接骨板 (右)	2~18 孔	长: 85.5~373.5±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP45	胫骨远端外侧叉形普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDW45	胫骨远端外侧叉形方向孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDJ45	胫骨远端外侧叉形结合孔锁定加压接骨板 (右)		
	YSDZ46	胫骨远端外侧叉形锁定加压接骨板 (左)	2~18 孔	长: 85.5~373.5±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP46	胫骨远端外侧叉形普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW46	胫骨远端外侧叉形方向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ46	胫骨远端外侧叉形结合孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDZ47	股骨远端内侧锁定加压接骨板 (左)	3~18 孔	长: 114~384±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 18.0±0.5 厚: 5.4±0.25
	YSDP47	股骨远端内侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDW47	股骨远端内侧方向孔锁定加压接骨板 (左)		
	YSDJ47	股骨远端内侧结合孔锁定加压接骨板 (左)		
YSDZ48	股骨远端内侧锁定加压接骨板 (右)	3~18 孔	长: 114~384±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 18.0±0.5 厚: 5.4±0.25	
YSDP48	股骨远端内侧普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDW48	股骨远端内侧方向孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDJ48	股骨远端内侧结合孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDZ49	股骨远端髌锁定加压接骨板 (左)	2~18 孔	长: 110~398±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 18.0±0.5 厚: 5.4±0.25	
YSDP49	股骨远端髌普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDW49	股骨远端髌方向孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDJ49	股骨远端髌结合孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDZ50	股骨远端髌锁定加压接骨板 (右)	2~18 孔	长: 110~398±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 18.0±0.5 厚: 5.4±0.25	
YSDP50	股骨远端髌普通螺纹孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDW50	股骨远端髌方向孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDJ50	股骨远端髌结合孔锁定加压接骨板 (右)			
YSDZ51	股骨髌支持锁定加压接骨板 (左)	3~18 孔	长: 90~360±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 18.0±0.5 厚: 5.4±0.25	
YSDP51	股骨髌支持普通螺纹孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDW51	股骨髌支持方向孔锁定加压接骨板 (左)			
YSDJ51	股骨髌支持结合孔锁定加压接骨板 (左)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁定 接骨 板	YSDZ52	股骨髁支持锁定加压接骨板(右)	3~18孔	长: 90~360±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 18.0±0.5 厚: 5.4±0.25
	YSDP52	股骨髁支持普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW52	股骨髁支持万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ52	股骨髁支持结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ53	股骨远端外侧锁定加压接骨板(左)	2~18孔	长: 95~383±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 17.5±0.5 厚: 5.4±0.25
	YSDP53	股骨远端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW53	股骨远端外侧万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ53	股骨远端外侧结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ54	股骨远端外侧锁定加压接骨板(右)	2~18孔	长: 95~383±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 17.5±0.5 厚: 5.4±0.25
	YSDP54	股骨远端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW54	股骨远端外侧万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ54	股骨远端外侧结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ55	135°弯头锁定加压接骨板	2~18孔	长: 92.5~348.5±2.0(每间隔16mm为一规格) 宽: 18.0±0.5(板体最宽处) 厚: 7.5±0.25
	YSDP55	135°弯头普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW55	135°弯头万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ55	135°弯头结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ56	95°弯头锁定加压接骨板	2~18孔	长: 82~338±2.0(每间隔16mm为一规格) 宽: 18.0±0.5(板体最宽处) 厚: 7.5±0.25
	YSDP56	95°弯头普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW56	95°弯头万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ56	95°弯头结合孔锁定加压接骨板		
	YSDZ57	胫骨远端锁定加压接骨板(左)	2~18孔	长: 79~271±2.0(每间隔12mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 3.0±0.25、4.0±0.25
	YSDP57	胫骨远端普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW57	胫骨远端万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ57	胫骨远端结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ58	胫骨远端锁定加压接骨板(右)	2~18孔	长: 79~271±2.0(每间隔12mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 3.0±0.25、4.0±0.25
	YSDP58	胫骨远端普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW58	胫骨远端万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ58	胫骨远端结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ59	弧形锁定接骨板	4~18孔	宽: 10.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP59	弧形普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW59	弧形万向孔锁定接骨板		
	YSDJ59	弧形结合孔锁定接骨板		
	YSDZ60	弧形锁定加压接骨板	4~18孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP60	弧形普通螺纹孔锁定加压接骨板		
	YSDW60	弧形万向孔锁定加压接骨板		
	YSDJ60	弧形结合孔锁定加压接骨板		
YSDZ61	腓骨远端锁定加压接骨板(左)	2~16孔	长: 63~217±2.0(每间隔11mm为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25	
YSDP61	腓骨远端普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW61	腓骨远端万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ61	腓骨远端结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ62	腓骨远端锁定加压接骨板(右)	2~16孔	长: 63~217±2.0(每间隔11mm为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25	
YSDP62	腓骨远端普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW62	腓骨远端万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ62	腓骨远端结合孔锁定加压接骨板(右)			
YSDZ63	胫骨远端髁锁定加压接骨板(右)	2~12孔	长: 80~200±2.0(每间隔12mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 4.0±0.25	
YSDP63	胫骨远端髁普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW63	胫骨远端髁万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ63	胫骨远端髁结合孔锁定加压接骨板(右)			
YSDZ64	胫骨远端髁锁定加压接骨板(左)	2~12孔	长: 80~200±2.0(每间隔12mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 4.0±0.25	
YSDP64	胫骨远端髁普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW64	胫骨远端髁万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ64	胫骨远端髁结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ65	T形锁定加压接骨板(单弯)	3~18孔	长: 65~305±2.0(每间隔16mm为一规格) 宽: 15.4±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25	
YSDP65	T形普通螺纹孔锁定加压接骨板(单弯)			
YSDW65	T形万向孔锁定加压接骨板(单弯)			
YSDJ65	T形结合孔锁定加压接骨板(单弯)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁定 接骨 板	YSDZ65	T形锁定加压接骨板(双弯)	3~18孔	长: 65~305±2.0(每间隔16mm为一规格) 宽: 15.4±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP65	T形普通螺纹孔锁定加压接骨板(双弯)		
	YSDW65	T形万向孔锁定加压接骨板(双弯)		
	YSDJ65	T形结合孔锁定加压接骨板(双弯)		
	YSDZ66	L形双曲锁定加压接骨板(右)	3~18孔	长: 56~326±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 13.8±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP66	L形双曲普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW66	L形双曲万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ66	L形双曲结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ66	L形单曲锁定加压接骨板(右)		
	YSDP66	L形单曲普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW66	L形单曲万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ66	L形单曲结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ67	L形双曲锁定加压接骨板(左)	3~18孔	长: 56~326±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 13.8±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP67	L形双曲普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW67	L形双曲万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ67	L形双曲结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ67	L形单曲锁定加压接骨板(左)		
	YSDP67	L形单曲普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW67	L形单曲万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ67	L形单曲结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ68	股骨近端外侧锁定加压接骨板(右)	3~18孔	长: 101~371±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 17.5±0.5 厚: 5.4±0.25
	YSDP68	股骨近端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW68	股骨近端外侧万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ68	股骨近端外侧结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ69	股骨近端外侧锁定加压接骨板(左)	3~18孔	长: 101~371±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 17.5±0.5 厚: 5.4±0.25
	YSDP69	股骨近端外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW69	股骨近端外侧万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ69	股骨近端外侧结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ70	胫骨平台外侧锁定加压接骨板(右)	3~18孔	长: 106~376±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP70	胫骨平台外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDW70	胫骨平台外侧万向孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDJ70	胫骨平台外侧结合孔锁定加压接骨板(右)		
	YSDZ71	胫骨平台外侧锁定加压接骨板(左)	3~18孔	长: 106~376±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 16.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25、4.0±0.25
	YSDP71	胫骨平台外侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDW71	胫骨平台外侧万向孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDJ71	胫骨平台外侧结合孔锁定加压接骨板(左)		
	YSDZ72	微创动力髌锁定加压接骨板(130°)	3~18孔	长: 106~346±2.0(每间隔16mm为一规格) 宽: 18.0±0.5(板体最宽处) 厚: 7.8±0.25(板体最厚处)
	YSDP72	微创动力髌普通螺纹孔锁定加压接骨板(130°)		
	YSDW72	微创动力髌万向孔锁定加压接骨板(130°)		
	YSDJ72	微创动力髌结合孔锁定加压接骨板(130°)		
YSDZ72	微创动力髌锁定加压接骨板(135°)			
YSDP72	微创动力髌普通螺纹孔锁定加压接骨板(135°)			
YSDW72	微创动力髌万向孔锁定加压接骨板(135°)			
YSDJ72	微创动力髌结合孔锁定加压接骨板(135°)			
YSDZ72	微创动力髌锁定加压接骨板(140°)			
YSDP72	微创动力髌普通螺纹孔锁定加压接骨板(140°)			
YSDW72	微创动力髌万向孔锁定加压接骨板(140°)			
YSDJ72	微创动力髌结合孔锁定加压接骨板(140°)			
YSDZ73	胫骨近端后侧锁定加压接骨板(左)	3~10孔	长: 87~192±2.0(每间隔15mm为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25、3.5±0.25	
YSDP73	胫骨近端后侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW73	胫骨近端后侧万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ73	胫骨近端后侧结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ74	胫骨近端后侧锁定加压接骨板(右)	3~10孔	长: 87~192±2.0(每间隔15mm为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25、3.5±0.25	
YSDP74	胫骨近端后侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW74	胫骨近端后侧万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ74	胫骨近端后侧结合孔锁定加压接骨板(右)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁 定 接 骨 板	YSDZ75	肱骨近端锁定加压接骨板Ⅱ	2~18孔	长: 78~270±2.0 (每间隔12mm为一规格) 宽: 12.0±0.5 厚: 3.0±0.25、3.5±0.25
	YSDP75	肱骨近端普通螺纹孔锁定加压接骨板Ⅱ		
	YSDW75	肱骨近端万向孔锁定加压接骨板Ⅱ		
	YSDJ75	肱骨近端结合孔锁定加压接骨板Ⅱ		
	YSDZ76	桡骨远端锁定接骨板(左)	9孔	厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP76	桡骨远端普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW76	桡骨远端万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ76	桡骨远端结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ77	桡骨远端锁定接骨板(右)	9孔	厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP77	桡骨远端普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW77	桡骨远端万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ77	桡骨远端结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ78	桡骨掌侧锁定接骨板(左)	3~12孔	长: 53~125±2.0 (每间隔8mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP78	桡骨掌侧普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW78	桡骨掌侧万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ78	桡骨掌侧结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ79	桡骨掌侧锁定接骨板(右)	3~12孔	长: 53~125±2.0 (每间隔8mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP79	桡骨掌侧普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW79	桡骨掌侧万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ79	桡骨掌侧结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ80	宽头斜T型锁定加压接骨板Ⅱ(左)	3~12孔	长: 60~168±2.0 (每间隔12mm为一规格) 宽: 7.5±0.5 厚: 1.2±0.2、1.6±0.25、2.0±0.25
	YSDP80	宽头斜T型普通螺纹孔锁定加压接骨板Ⅱ(左)		
	YSDW80	宽头斜T型万向孔锁定加压接骨板Ⅱ(左)		
	YSDJ80	宽头斜T型结合孔锁定加压接骨板Ⅱ(左)		
	YSDZ81	宽头斜T型锁定加压接骨板Ⅱ(右)	3~12孔	长: 60~168±2.0 (每间隔12mm为一规格) 宽: 7.5±0.5 厚: 1.2±0.2、1.6±0.25、2.0±0.25
	YSDP81	宽头斜T型普通螺纹孔锁定加压接骨板Ⅱ(右)		
	YSDW81	宽头斜T型万向孔锁定加压接骨板Ⅱ(右)		
	YSDJ81	宽头斜T型结合孔锁定加压接骨板Ⅱ(右)		
	YSDZ82	π形锁定接骨板(右)	8~16孔	厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP82	π形普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW82	π形万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ82	π形结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ83	π形锁定接骨板(左)	8~16孔	厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP83	π形普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW83	π形万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ83	π形结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ84	跟骨锁定接骨板Ⅷ(左)	8~10孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP84	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板Ⅷ(左)		
	YSDW84	跟骨万向孔锁定接骨板Ⅷ(左)		
	YSDJ84	跟骨结合孔锁定接骨板Ⅷ(左)		
YSDZ85	跟骨锁定接骨板Ⅸ(右)	5孔	厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25	
YSDP85	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板Ⅸ(右)			
YSDW85	跟骨万向孔锁定接骨板Ⅸ(右)			
YSDJ85	跟骨结合孔锁定接骨板Ⅸ(右)			
YSDZ86	跟骨锁定接骨板Ⅸ(左)	5孔	厚: 1.2±0.2、1.5±0.25、2.0±0.25	
YSDP86	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板Ⅸ(左)			
YSDW86	跟骨万向孔锁定接骨板Ⅸ(左)			
YSDJ86	跟骨结合孔锁定接骨板Ⅸ(左)			
YSDZ87	微型T型锁定接骨板(头2孔)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为18~68±2.0(每间隔6mm为一规格)。 厚度为1.5±0.2或2.0±0.2,其宽度为6.4±0.5,其长度为22~82±2.0(每间隔7.5mm为一规格)。	
YSDP87	微型T型普通螺纹孔锁定接骨板(头2孔)			
YSDW87	微型T型万向孔锁定接骨板(头2孔)			
YSDJ87	微型T型结合孔锁定接骨板(头2孔)			
YSDZ88	微型T型锁定接骨板(头3孔)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为18~68±2.0(每间隔6mm为一规格)。 厚度为1.5±0.2或2.0±0.2,其宽度为6.4±0.5,其长度为22~82±2.0(每间隔7.5mm为一规格)。	
YSDP88	微型T型普通螺纹孔锁定接骨板(头3孔)			
YSDW88	微型T型万向孔锁定接骨板(头3孔)			
YSDJ88	微型T型结合孔锁定接骨板(头3孔)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型锁定接骨板	YSDZ89	微型L型锁定接骨板(左)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为18~68±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP89	微型L型普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW89	微型L型万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ89	微型L型结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ90	微型L型锁定接骨板(右)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为18~68±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP90	微型L型普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW90	微型L型万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ90	微型L型结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ91	微型斜L型锁定接骨板(左)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为23~71±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP91	微型斜L型普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW91	微型斜L型万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ91	微型斜L型结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ92	微型斜L型锁定接骨板(右)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为23~71±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP92	微型斜L型普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW92	微型斜L型万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ92	微型斜L型结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ93	微型斜T型锁定接骨板(右)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为22~70±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP93	微型斜T型普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW93	微型斜T型万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ93	微型斜T型结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ94	微型斜T型锁定接骨板(左)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为22~70±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP94	微型斜T型普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW94	微型斜T型万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ94	微型斜T型结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ95	微型Y型锁定接骨板(头3孔)	2~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其宽度为4.5±0.5、5.0±0.5,其长度为23~71±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP95	微型Y型普通螺纹孔锁定接骨板(头3孔)		
	YSDW95	微型Y型万向孔锁定接骨板(头3孔)		
	YSDJ95	微型Y型结合孔锁定接骨板(头3孔)		
	YSDZ96	方型锁定接骨板	4~10孔	厚度为1.0±0.2或1.2±0.2,其长度为10.5~28.5±2.0(每间隔6mm为一规格)。
	YSDP96	方型普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW96	方型万向孔锁定接骨板		
	YSDJ96	方型结合孔锁定接骨板		
YSDZ97	距骨锁定接骨板(左)	5~10孔	厚:1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2、2.0±0.2	
YSDP97	距骨普通螺纹孔锁定接骨板(左)			
YSDW97	距骨万向孔锁定接骨板(左)			
YSDJ97	距骨结合孔锁定接骨板(左)			
YSDZ98	距骨锁定接骨板(右)	5~10孔	厚:1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2、2.0±0.2	
YSDP98	距骨普通螺纹孔锁定接骨板(右)			
YSDW98	距骨万向孔锁定接骨板(右)			
YSDJ98	距骨结合孔锁定接骨板(右)			
YSDZ99	钩型锁定张力带接骨板(右)	2~18孔	长:90~378±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽:17.5±0.5 厚:5.5±0.25、6.5±0.25	
YSDP99	钩型普通螺纹孔锁定张力带接骨板(右)			
YSDW99	钩型万向孔锁定张力带接骨板(右)			
YSDJ99	钩型结合孔锁定张力带接骨板(右)			
YSDZ100	股骨近端锁定加压接骨板(左)	3~18孔	长:101~371±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽:17.5±0.5 厚:5.5±0.25	
YSDP100	股骨近端普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW100	股骨近端万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ100	股骨近端结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ101	股骨近端锁定加压接骨板(右)	3~18孔	长:101~371±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽:17.5±0.5 厚:5.5±0.25	
YSDP101	股骨近端普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW101	股骨近端万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ101	股骨近端结合孔锁定加压接骨板(右)			
YSDZ102	自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(左)(S4R)	12~29孔	厚2.5±0.2、3.0±0.2	
YSDP102	自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(左)(S4R)			
YSDW102	自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(左)(S4R)			
YSDJ102	自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(左)(S4R)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁定 接骨 板	YSDZ102	自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(左)(S5R)	12~29孔	厚 2.5±0.2、3.0±0.2
	YSDP102	自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(左)(S5R)		
	YSDW102	自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(左)(S5R)		
	YSDJ102	自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(左)(S5R)		
	YSDZ102	半自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(左)(4R)		
	YSDP102	半自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(左)(4R)		
	YSDW102	半自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(左)(4R)		
	YSDJ102	半自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(左)(4R)		
	YSDZ102	半自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(左)(5R)		
	YSDP102	半自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(左)(5R)		
	YSDW102	半自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(左)(5R)		
	YSDJ102	半自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(左)(5R)		
	YSDZ103	自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(右)(S4R)	12~29孔	厚 2.5±0.2、3.0±0.2
	YSDP103	自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(右)(S4R)		
	YSDW103	自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(右)(S4R)		
	YSDJ103	自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(右)(S4R)		
	YSDZ103	自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(右)(S5R)		
	YSDP103	自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(右)(S5R)		
	YSDW103	自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(右)(S5R)		
	YSDJ103	自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(右)(S5R)		
	YSDZ103	半自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(右)(4R)		
	YSDP103	半自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(右)(4R)		
	YSDW103	半自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(右)(4R)		
	YSDJ103	半自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(右)(4R)		
	YSDZ103	半自锁型髌白后柱解剖锁定接骨板(右)(5R)		
	YSDP103	半自锁型髌白后柱解剖普通螺纹孔锁定接骨板(右)(5R)		
	YSDW103	半自锁型髌白后柱解剖万向孔锁定接骨板(右)(5R)		
	YSDJ103	半自锁型髌白后柱解剖结合孔锁定接骨板(右)(5R)		
	YSDZ104	尺骨鹰嘴锁定接骨板(左)	3~18孔	长: 73.5~268.5±2.0(每间隔13mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
	YSDP104	尺骨鹰嘴普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW104	尺骨鹰嘴万向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ104	尺骨鹰嘴结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ105	尺骨鹰嘴锁定接骨板(右)	3~18孔	长: 73.5~268.5±2.0(每间隔13mm为一规格) 宽: 11.0±0.5 厚: 2.5±0.25、3.0±0.25
YSDP105	尺骨鹰嘴普通螺纹孔锁定接骨板(右)			
YSDW105	尺骨鹰嘴万向孔锁定接骨板(右)			
YSDJ105	尺骨鹰嘴结合孔锁定接骨板(右)			
YSDZ106	斜T型锁定加压接骨板(左)	3~18孔	长: 78~348±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 13.8±0.5 厚: 3.5±0.25、4.0±0.25	
YSDP106	斜T型普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW106	斜T型万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ106	斜T型结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ107	斜T型锁定加压接骨板(右)	3~18孔	长: 78~348±2.0(每间隔18mm为一规格) 宽: 13.8±0.5 厚: 3.5±0.25、4.0±0.25	
YSDP107	斜T型普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW107	斜T型万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ107	斜T型结合孔锁定加压接骨板(右)			
YSDZ108	胫骨远端腓侧锁定加压接骨板(右)	2~18孔	长: 52~244±2.0(每间隔12mm为一规格) 宽: 13.5±0.5 厚: 3.5±0.25、4.0±0.25	
YSDP108	胫骨远端腓侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(右)			
YSDW108	胫骨远端腓侧万向孔锁定加压接骨板(右)			
YSDJ108	胫骨远端腓侧结合孔锁定加压接骨板(右)			
YSDZ109	胫骨远端腓侧锁定加压接骨板(左)	2~18孔	长: 52~244±2.0(每间隔12mm为一规格) 宽: 13.5±0.5 厚: 3.5±0.25、4.0±0.25	
YSDP109	胫骨远端腓侧普通螺纹孔锁定加压接骨板(左)			
YSDW109	胫骨远端腓侧万向孔锁定加压接骨板(左)			
YSDJ109	胫骨远端腓侧结合孔锁定加压接骨板(左)			
YSDZ110	肱骨远端内侧钩形锁定接骨板(左)	3~18孔	长: 71~236±2.0(每间隔11mm为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25	
YSDP110	肱骨远端内侧钩形普通螺纹孔锁定接骨板(左)			
YSDW110	肱骨远端内侧钩形万向孔锁定接骨板(左)			
YSDJ110	肱骨远端内侧钩形结合孔锁定接骨板(左)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁 定 接 骨 板	YSDZ111	肱骨远端内侧钩形锁定接骨板(右)	3~18孔	长: 71~236±2.0(每间隔11mm为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25
	YSDP111	肱骨远端内侧钩形普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW111	肱骨远端内侧钩形方向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ111	肱骨远端内侧钩形结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ112	肱骨远端内侧锁定接骨板(左)	3~18孔	长: 71~236±2.0(每间隔11mm为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25
	YSDP112	肱骨远端内侧普通螺纹孔锁定接骨板(左)		
	YSDW112	肱骨远端内侧方向孔锁定接骨板(左)		
	YSDJ112	肱骨远端内侧结合孔锁定接骨板(左)		
	YSDZ113	肱骨远端内侧锁定接骨板(右)	3~18孔	长: 71~236±2.0(每间隔11mm为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 2.0±0.25
	YSDP113	肱骨远端内侧普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW113	肱骨远端内侧方向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ113	肱骨远端内侧结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ114	S型锁骨肩胛段锁定接骨板I(右)	4~10孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP114	S型锁骨肩胛段普通螺纹孔锁定接骨板I(右)		
	YSDW114	S型锁骨肩胛段方向孔锁定接骨板I(右)		
	YSDJ114	S型锁骨肩胛段结合孔锁定接骨板I(右)		
	YSDZ115	S型锁骨肩胛段锁定接骨板I(左)	4~10孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP115	S型锁骨肩胛段普通螺纹孔锁定接骨板I(左)		
	YSDW115	S型锁骨肩胛段方向孔锁定接骨板I(左)		
	YSDJ115	S型锁骨肩胛段结合孔锁定接骨板I(左)		
	YSDZ116	X型锁定接骨板	4孔	厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP116	X型普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW116	X型方向孔锁定接骨板		
	YSDJ116	X型结合孔锁定接骨板		
	YSDZ117	骰骨锁定接骨板	11孔	厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP117	骰骨普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW117	骰骨方向孔锁定接骨板		
	YSDJ117	骰骨结合孔锁定接骨板		
	YSDZ118	舟状骨锁定接骨板	9孔	厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP118	舟状骨普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW118	舟状骨方向孔锁定接骨板		
	YSDJ118	舟状骨结合孔锁定接骨板		
	YSDZ119	翼形锁定接骨板	2~10孔	长: 44~92±2.0(每间隔6mm为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP119	翼形普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW119	翼形方向孔锁定接骨板		
	YSDJ119	翼形结合孔锁定接骨板		
	YSDZ120	斜翼形锁定接骨板	2~10孔	长: 44~92±2.0(每间隔6mm为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP120	斜翼形普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW120	斜翼形方向孔锁定接骨板		
	YSDJ120	斜翼形结合孔锁定接骨板		
	YSDZ121	微型三叶锁定接骨板	2~12孔	长: 40~100±2.0(每间隔6mm为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP121	微型三叶普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW121	微型三叶方向孔锁定接骨板		
	YSDJ121	微型三叶结合孔锁定接骨板		
	YSDZ122	趾掌T型锁定接骨板(头2孔)	2~12孔	长: 35~95±2.0(每间隔6mm为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP122	趾掌T型普通螺纹孔锁定接骨板(头2孔)		
	YSDW122	趾掌T型方向孔锁定接骨板(头2孔)		
	YSDJ122	趾掌T型结合孔锁定接骨板(头2孔)		
YSDZ123	趾掌T型锁定接骨板(头3孔)	2~12孔	长: 35~95±2.0(每间隔6mm为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2	
YSDP123	趾掌T型普通螺纹孔锁定接骨板(头3孔)			
YSDW123	趾掌T型方向孔锁定接骨板(头3孔)			
YSDJ123	趾掌T型结合孔锁定接骨板(头3孔)			
YSDZ124	趾掌L型锁定接骨板(左)	2~12孔	长: 29~95±2.0(每间隔6mm为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2	
YSDP124	趾掌L型普通螺纹孔锁定接骨板(左)			
YSDW124	趾掌L型方向孔锁定接骨板(左)			
YSDJ124	趾掌L型结合孔锁定接骨板(左)			

表1 金属锁定接骨板型式规格表(续)

型号	型式代号	产品描述	规格	
			孔数	长度(mm)、宽度(mm)、厚度(mm)
异型 锁定 接骨 板	YSDZ125	趾掌 L 型锁定接骨板(右)	2~12 孔	长: 29~95±2.0 (每间隔 6mm 为一规格) 宽: 4.0±0.5、5.0±0.5、6.0±0.5、8.0±0.5 厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP125	趾掌 L 型普通螺纹孔锁定接骨板(右)		
	YSDW125	趾掌 L 型万向孔锁定接骨板(右)		
	YSDJ125	趾掌 L 型结合孔锁定接骨板(右)		
	YSDZ126	弓形锁定接骨板	2 孔	厚: 1.0±0.2、1.2±0.2、1.5±0.2
	YSDP126	弓形普通螺纹孔锁定接骨板		
	YSDW126	弓形万向孔锁定接骨板		
	YSDJ126	弓形结合孔锁定接骨板		
	YSDZ127	跟骨锁定接骨板Ⅷ(右)	8~10 孔	厚: 2.0±0.25
	YSDP127	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板Ⅷ(右)		
	YSDW127	跟骨万向孔锁定接骨板Ⅷ(右)		
	YSDJ127	跟骨结合孔锁定接骨板Ⅷ(右)		
	YSDZ128	胫骨近端后侧锁定加压接骨板Ⅱ	3~10 孔	长: 39~102±2.0 (每间隔 9mm 为一规格) 宽: 10±0.5 厚: 2.0±0.2、2.5±0.2、3.0±0.2
	YSDP128	胫骨近端后侧普通螺纹孔锁定加压接骨板Ⅱ		
	YSDW128	胫骨近端后侧万向孔锁定加压接骨板Ⅱ		
	YSDJ128	胫骨近端后侧结合孔锁定加压接骨板Ⅱ		
	YSDZ129	跟骨锁定接骨板 X(右)	10~13 孔	长: 45~75±2.0 (每间隔 1mm 为一规格) 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP129	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 X(右)		
	YSDW129	跟骨万向孔锁定接骨板 X(右)		
	YSDJ129	跟骨结合孔锁定接骨板 X(右)		
	YSDZ130	跟骨锁定接骨板 X(左)	10~13 孔	长: 45~75±2.0 (每间隔 1mm 为一规格) 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25
	YSDP130	跟骨普通螺纹孔锁定接骨板 X(左)		
	YSDW130	跟骨万向孔锁定接骨板 X(左)		
	YSDJ130	跟骨结合孔锁定接骨板 X(左)		
	YSDZ131	钩型锁定张力带接骨板(左)	2~18 孔	长: 90~378±2.0 (每间隔 18mm 为一规格) 宽: 17.5±0.5 厚: 5.5±0.25、6.5±0.25
	YSDP131	钩型普通螺纹孔锁定张力带接骨板(左)		
	YSDW131	钩型万向孔锁定张力带接骨板(左)		
	YSDJ131	钩型结合孔锁定张力带接骨板(左)		
	YSDZ132	肩胛段锁定翼形接骨板(右)	3~10 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
	YSDP132	肩胛段普通螺纹孔锁定翼形接骨板(右)		
	YSDW132	肩胛段万向孔锁定翼形接骨板(右)		
	YSDJ132	肩胛段结合孔锁定翼形接骨板(右)		
	YSDZ133	肩胛段锁定翼形接骨板(左)	3~10 孔	宽: 10.0±0.5 厚: 3.0±0.25
YSDP133	肩胛段普通螺纹孔锁定翼形接骨板(左)			
YSDW133	肩胛段万向孔锁定翼形接骨板(左)			
YSDJ133	肩胛段结合孔锁定翼形接骨板(左)			
YSDZ134	桡骨掌侧锁定接骨板 I(左)	3~12 孔	长: 47~127±2.0 (每间隔 8mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25	
YSDP134	桡骨掌侧普通螺纹孔锁定接骨板 I(左)			
YSDW134	桡骨掌侧万向孔锁定接骨板 I(左)			
YSDJ134	桡骨掌侧结合孔锁定接骨板 I(左)			
YSDZ135	桡骨掌侧锁定接骨板 I(右)	3~12 孔	长: 47~127±2.0 (每间隔 8mm 为一规格) 宽: 10.0±0.5 厚: 1.5±0.25、2.0±0.25	
YSDP135	桡骨掌侧普通螺纹孔锁定接骨板 I(右)			
YSDW135	桡骨掌侧万向孔锁定接骨板 I(右)			
YSDJ135	桡骨掌侧结合孔锁定接骨板 I(右)			

表2 锁定螺钉、封孔螺丝型式规格表

产品型式	型式代号	规格尺寸		产品描述
		规格直径 (mm)	长度范围 (mm)	
实心 锁定 螺钉	QSDZ01.01	1.2 1.5 2.0 2.4 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	直径 6.0 以下螺钉长度为 6~120 (每 2mm 为一规格) 直径 6.0 及以上螺钉长度为 25~120 (每隔 5mm 为一规格)	锥螺纹六角平头锁定螺钉
	QSDZ02.01			锥螺纹梅花平头锁定螺钉
	QSDZ03.01			锥螺纹四方平头锁定螺钉
	QSDZ04.01			锥螺纹十字平头锁定螺钉
	QSDZ01.02			锥螺纹六角圆头锁定螺钉
	QSDZ02.02			锥螺纹梅花圆头锁定螺钉
	QSDZ03.02			锥螺纹四方圆头锁定螺钉
	QSDZ04.02			锥螺纹十字圆头锁定螺钉

表2 锁定螺钉、封孔螺丝型式规格表 (续)

产品型式	型式代号	规格尺寸		产品描述
		规格直径 (mm)	长度范围 (mm)	
实心 锁定螺钉	QSDP01.01	1.2 1.5 2.0 2.4 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	直径 6.0 以下螺钉长度为 6~120 (每 2mm 为一规格)	普通螺纹六角平头锁定螺钉
	QSDP02.01			普通螺纹梅花平头锁定螺钉
	QSDP03.01			普通螺纹四方平头锁定螺钉
	QSDP04.01			普通螺纹十字平头锁定螺钉
	QSDP01.02			普通螺纹六角圆头锁定螺钉
	QSDP02.02			普通螺纹梅花圆头锁定螺钉
	QSDP03.02			普通螺纹四方圆头锁定螺钉
	QSDP04.02			普通螺纹十字圆头锁定螺钉
	QSDW01.01		直径 6.0 及以上螺钉长度为 25~120 (每隔 5mm 为一规格)	万向六角平头锁定螺钉
	QSDW02.01			万向梅花平头锁定螺钉
	QSDW03.01			万向四方平头锁定螺钉
	QSDW04.01			万向十字平头锁定螺钉
	QSDW01.02			万向六角圆头锁定螺钉
	QSDW02.02			万向梅花圆头锁定螺钉
	QSDW03.02			万向四方圆头锁定螺钉
	QSDW04.02			万向十字圆头锁定螺钉
空心 锁定螺钉	QSDKZ01.01	2.7 3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	直径 6.0 以下螺钉长度为 6~120 (每 2mm 为一规格)	锥螺纹六角平头锁定螺钉
	QSDKZ02.01			锥螺纹梅花平头锁定螺钉
	QSDKZ03.01			锥螺纹四方平头锁定螺钉
	QSDKZ04.01			锥螺纹十字平头锁定螺钉
	QSDKZ01.02			锥螺纹六角圆头锁定螺钉
	QSDKZ02.02			锥螺纹梅花圆头锁定螺钉
	QSDKZ03.02			锥螺纹四方圆头锁定螺钉
	QSDKZ04.02			锥螺纹十字圆头锁定螺钉
	QSDKP01.01		直径 6.0 及以上螺钉长度为 25~120 (每隔 5mm 为一规格)	普通螺纹六角平头锁定螺钉
	QSDKP02.01			普通螺纹梅花平头锁定螺钉
	QSDKP03.01			普通螺纹四方平头锁定螺钉
	QSDKP04.01			普通螺纹十字平头锁定螺钉
	QSDKP01.02			普通螺纹六角圆头锁定螺钉
	QSDKP02.02			普通螺纹梅花圆头锁定螺钉
	QSDKP03.02			普通螺纹四方圆头锁定螺钉
	QSDKP04.02			普通螺纹十字圆头锁定螺钉
	QSDKW01.01			万向六角平头锁定螺钉
	QSDKW02.01			万向梅花平头锁定螺钉
	QSDKW03.01			万向四方平头锁定螺钉
	QSDKW04.01			万向十字平头锁定螺钉
	QSDKW01.02			万向六角圆头锁定螺钉
	QSDKW02.02			万向梅花圆头锁定螺钉
	QSDKW03.02			万向四方圆头锁定螺钉
	QSDKW04.02			万向十字圆头锁定螺钉
封孔螺丝	FKLZ01	---	---	锥螺纹六角封孔螺丝
	FKLZ02			锥螺纹梅花封孔螺丝
	FKLZ03			锥螺纹四方封孔螺丝
	FKLZ04			锥螺纹十字封孔螺丝
	FKLP01			普通螺纹六角封孔螺丝
	FKLP02			普通螺纹梅花封孔螺丝
	FKLP03			普通螺纹四方封孔螺丝
	FKLP04			普通螺纹十字封孔螺丝
	FKLW01			万向六角封孔螺丝
	FKLW02			万向梅花封孔螺丝
	FKLW03			万向四方封孔螺丝
	FKLW04			万向十字封孔螺丝
锁定帽	SDM01	---	---	六角锁定帽
	SDM02			梅花锁定帽
	SDM03			四方锁定帽
	SDM04			十字锁定帽

表2 锁定螺钉、封孔螺丝型式规格表(续)

产品型式	型式代号	规格尺寸		产品描述
		规格直径 (mm)	长度范围 (mm)	
压紧螺丝	YJL01	—	—	六角压紧螺丝
	YJL02			梅花压紧螺丝
	YJL03			四方压紧螺丝
	YJL04			十字压紧螺丝
镶套	XT	—	—	镶套

二 主要性能指标

- 1 产品采用符合 GB/T13810 标准中 TA3、TA4 纯钛材料及 Tc4 钛合金材料制成。
- 2 产品表面硬度：纯钛≥150HV10，钛合金≥260HV10。
- 3 锁定接骨板的弯曲强度和等效弯曲刚度、锁定螺钉最大断裂扭矩和最大断裂扭转角应符合注册产品标准要求。
- 4 产品表面不得有不连续缺陷。
- 5 产品表面分阳极氧化处理或非阳极氧化处理两种，表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、附着物等缺陷。
- 6 锁定接骨板钉系统连接配合处，其配合性能应良好，不得有过松或卡塞现象。

三 产品基本尺寸参数见表3、表4

表3 锁定接骨板基本尺寸参数表

单位：mm

普通螺钉孔直径			锁定螺钉孔直径				球形槽半径	板厚度
基本尺寸			基本尺寸					
1.6	2.0	2.1	2.6	2.9	3.1	+0.20 0	1.5	2.0
3.4	3.6	3.8	4.2	4.6	4.7		2.5	3.0
5.2	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0		3.5	4.0
6.2	6.4	6.6	7.2					

表4 锁定螺钉、封孔螺丝基本尺寸参数表

单位：mm

螺钉型式	螺纹孔外径		螺纹孔底径		螺距	锥螺纹孔角度	空心锁定螺钉内孔直径	螺钉规格长度
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
锁定螺钉	1.2	0 -0.15	1.0	0 -0.15	0.2~2.5	3° ~25°	0.8~2.8	6~120 (每2mm为一规格)
	1.5		1.3					
	2.0		1.6					
	2.4		2.0					
	2.7		2.2					
	3.0		2.5					
	3.5		2.7					
	4.0		3.0					
	4.5		3.5					
	5.0		4.0					
	5.5		4.4					
	6.0		4.8					
	6.5		5.2					
7.0	5.8	25~120 (每5mm为一规格)						
封孔螺丝	—	—	—	—	—	—	—	
锁定帽	—	—	—	—	—	—	—	
压紧螺丝	—	—	—	—	—	—	—	
镶套	—	—	—	—	—	—	—	

四 适用范围

金属锁定接骨板钉系统适用于四肢骨折的内固定。

五 禁忌症

对老年骨折疏松患者、骨折部位缺少足够的完整骨、肿瘤、感染、出血倾向，以及对金属过敏或手术有禁忌症者严禁使用。

六 注意事项及提示性说明

- 1) 本产品不得二次使用，二次使用可能造成交叉感染、产品疲劳性断裂及骨折部位再断裂、产品失效。不得与其它不同材料的植入物混合使用。植入物的使用受一定条件的严格控制，需注意临床使用要求，患者的自身条件会影响接骨板的使用性能。本产品植入和取出必须使用本公司配套的专用工具器械包。
- 2) 无菌包装产品应注意灭菌有效期，超过有效期应重新灭菌。非无菌产品术前必须进行灭菌处理。
灭菌方法：非无菌产品在使用前一般采用湿热灭菌（灭菌参数：121℃，30min 或 134℃，15min）。如采用其它灭菌方式，应注意其灭菌对产品性能的影响。
- 3) 术前应仔细测量骨折部位影像片，判定骨折部位情况，以便选择正确型式、合适规格的产品，可增强固定的稳定性。
- 4) 术中采用透视监控设备对骨折复位、产品植入位置的正确性检查至关重要。
- 5) 运输、贮存和安装过程中应避免损伤植入物产品，否则会显著降低产品的强度，导致固定失败。
- 6) 植入物产品不能替代正常人体骨骼受重，不适当的外力撞击或载重会导致产品弯曲或断裂，最终导致骨骼愈合失败。
- 7) 临床医生应告知患者术后活动强度对任何内固定物的使用寿命有显著影响。康复过程中医生应正确指导活动强度，防止活动过量，否则易导致固定松动、再骨折或断钉断板。患者必须按医嘱定期进行复查，及时观察和掌握骨折愈合情况，防止不良反应的发生。

- 8) 骨折愈合后应取出植入物。
- 9) 由于各人体骨的形状不一致，部分金属锁定接骨板在使用时可能需要塑形，在塑形过程中不能多次来回折弯，并注意折弯的程度，否则易导致疲劳操作会影响产品的使用强度。
- 10) 本产品螺钉与板配合使用，但过分用力会使钉孔绞碎性破坏，导致螺钉取出困难。
- 11) 不锈钢产品一般做 X 片检查，钛及钛合金产品对 CT、MRI、X 片等医学检查无任何干扰。
- 12) 本产品是用来促进伤口骨的愈合，不能承担骨折治疗阶段的全部应力。
- 13) 手术过程中，医生应将所使用产品的一张“产品合格证”贴到患者病历卡上，再将其余“产品合格证”加以保存，医院应详细记录本产品的使用情况，经销公司应建立产品分销记录，以便查找和追溯。

七 警示

1 可能的不良反应

- 1.1 骨不连接或延迟愈合可导致植入物断裂。
- 1.2 应力遮挡导致骨密度下降。
- 1.3 金属致敏或异物过敏反应。
- 1.4 由于植入物存在而产生疼痛、不适或感觉异常，可能需要取出植入物。
- 1.5 植入物松动、弯曲、断裂或产生裂痕，可能造成不愈合或延迟愈合。
- 1.6 血供不足或严重感染造成骨坏死。


病人术后出现以上任何副作用都需要进行早期修复术。

2 可能出现的并发症


- 2.1 感染；
- 2.2 骨折畸形愈合；
- 2.3 神经麻痹；
- 2.4 骨折不愈合或延迟愈合；
- 2.5 肢体短缩；
- 2.6 异位性骨增生；
- 2.7 关节疼痛；
- 2.8 粘连性关节囊炎；
- 2.9 内固定失败；
- 2.10 关节屈曲挛缩和关节僵硬；
- 2.11 技术原因并发症；
- 2.12 再骨折；
- 2.13 其它并发症：如局部水肿、股骨颈骨折和术中因过度牵引出现外阴水肿等。

八 产品标志、命名示例及标签所用的图形、符号、缩写的解释


1 产品标志示例

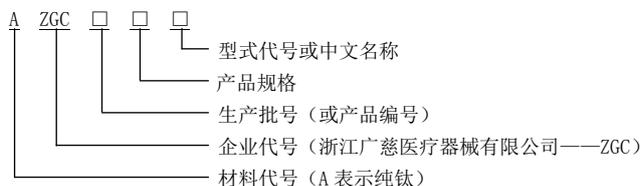


2 锁定接骨板型号示例

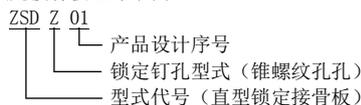


锁定螺钉型号示例

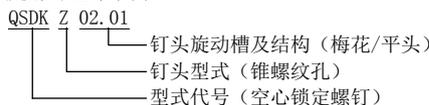


封孔螺丝型号示例

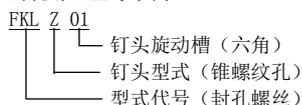

锁定帽型号示例

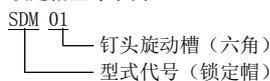

3 标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释：

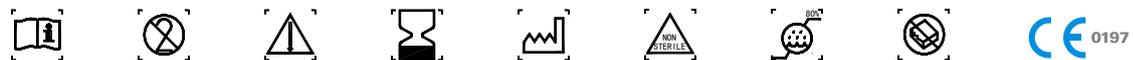

参考使用说明书 切勿再次使用 注意，参考随附文件 使用期限 制造日期 未灭菌 湿度限制 包装破损禁止使用 表示通过欧盟认证

九 安装和使用说明

1 术前准备：根据骨折部位和 X 线片确定锁定接骨板型式，初选几个规格，准备相配套使用的锁定螺钉和金属接骨螺钉若干，配备专用安装工具及其它必须的骨科手术器械，并对产品和器械进行灭菌（灭菌产品拆包装即可使用）。

2 手术操作步骤：

2.1 开切口并复位：在患处中线切口显露骨折部位，用剥离器将皮肤、肌肉和血管一起仔细牵开，在影像增强 X 线监视下按骨生理形状将骨折复位。

2.2 锁定接骨板试装和塑形：根据骨折情况选择确定产品规格，进行骨折部位试装，必要时进行塑形，以保证接骨板贴合骨骼。

警告：锁定接骨板折弯塑形应注意程度，必须用钢板弯曲器慢慢、多次折弯。切忌反复上下折弯，以免造成产品裂纹和疲劳应力集中而影响产品强度。

2.3 钻孔攻丝：根据安装位置，先钻一侧离骨折断端最近的第一个孔。钻孔必须根据接骨板所用接骨螺钉的直径，选用配套的导向器和钻头，钻透对侧骨皮质。（植入普通螺钉的孔中用丝攻预制螺纹孔，植入锁定螺钉的孔不得攻螺纹孔）

2.4 选择螺钉并植入（在同一骨块上，必须先置入普通螺钉，再置入锁定螺钉）：用测深器测量骨骼大小，以确定和选择锁定螺钉或接骨螺钉的长度，放置接骨板在正确位置，用六角或梅花形骨科用螺丝刀植入第一支螺钉，预拧紧。对位后用同样方法植入骨折线另一侧锁定螺钉和其它孔螺钉。螺钉植入全部孔位后，用快装手柄（扭力型）逐个拧紧。

2.5 术后检查及处理：确认金属锁定接骨板、钉安装位置准确后，用生理盐水冲洗创口，逐层缝合肌肉和皮肤并包敷。

3 金属锁定接骨板系统拆除手术操作步骤:

- 3.1 必须经医生检查确认骨愈合可靠后,方可拆除金属锁定接骨板和螺钉。
- 3.2 查看并切开原安装位置的皮肤肌肉,用骨科用螺丝刀逐个取出螺钉,取下金属锁定接骨板。
- 3.3 冲洗创口,逐层缝合肌肉和皮肤并包敷。
- 3.4 器械清洗。将使用后的产品进行销毁。

十 产品维护和保养方法、特殊储存、运输条件和办法

- 1) 产品运输和外包装按订货合同要求。正常情况下包装用硬板纸箱,路途较远或运输工具可能造成产品损坏的必须用牢固木板包装箱包装。产品运输过程中包装上不能载重,否则易造成非预期弯曲、表面伤痕及螺纹损坏等,损坏或缺陷产品不得再使用。
- 2) 本产品供货时采用洁净包装,内包装在十万级洁净室内进行洁净处理后采用透析医包材料热合密封包装,再进行单包装,在运输和贮存过程中造成内包装破损的产品,将可能造成产品污染,必须退回本公司重新包装。
- 3) 贮存条件:产品应放置在相对湿度不超过 80%,无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。
- 4) 植入物产品追溯有效期自出厂之日起为 15 年。
- 5) 在遵守贮存和正确灭菌及使用的条件下,从产品交付之日起二年内,因制造质量问题导致产品不能正常使用的,本公司无偿为用户退换产品。

十一 生产日期和使用期限

生产日期、使用期限见产品标签或合格证。

十二 注册人、生产企业名称、产品商标、注册地址、生产地址联系方式及售后服务单位

本公司产品注册商标:骨慈

注册人、生产企业、售后服务单位:浙江广慈医疗器械有限公司

电 话: 0574-63302082

注册地址、生产地址:浙江省慈溪市周巷镇开发东路 189 号

邮 编: 315324

传 真: 0574-63305338

网 址: www.zjgcy1.com

十三 编制或修订日期

2015 年 12 月 31 日 第 3 次修订
